

# INSTI®

## Samodzielne badanie na obecność wirusa HIV

### Instrukcja użytkownika


PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM

#### Ten test zawiera:



### Przygotowanie

Film szkoleniowy dostępny jest na stronie: [www.INSTI.com](http://www.INSTI.com)

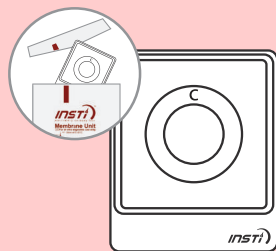

1. Otwórz pokrowiec z urządzeniem testowym.

**WAŻNE:** Oczyszczyć i osuszyć ręce.




2. Umieść urządzenie testowe na płaskiej powierzchni.

3. Zdejmij zakrętkę z pojemnika nr 1. Umieść go na płaskiej powierzchni.

**OSTRZEŻENIE:** Pojemnik nr 1 zawiera płyn. Należy obchodzić się z nim ostrożnie.

### Krok 1: Pobierz krew




Jeśli masz problemy podczas pobierania krwi, przejrzyj rozdział Najczęściej zadawane pytania na odwrocie.

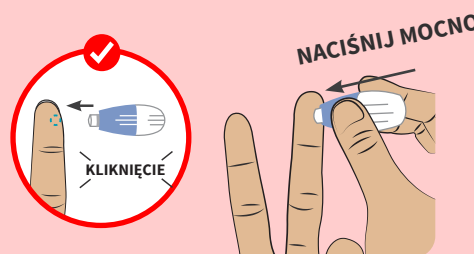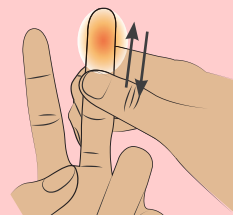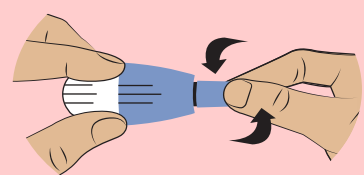

1. Przekręć i wyciągnij końcówkę lancetu. Usuń końcówkę.

2. Potrzyj palec i dłoń, aby zwiększyć przepływ krwi.

3. Umieść lancet z boku opuszki palca.

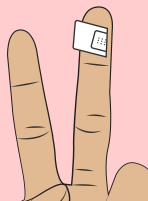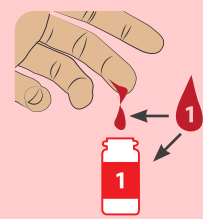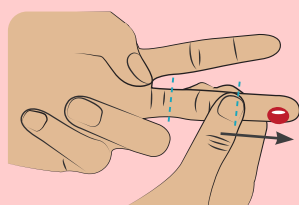


4. Potrzyj palcem, aby wytworzyć **DUŻĄ** kroplę krwi.


5. Pozwól, aby 1 kropla **PRZEPEŁYNEŁA** do pojemnika nr 1. Zakręć nakrętkę pojemnika nr 1.

6. Nałóż samoprzylepny plaster.

### Krok 2: Test

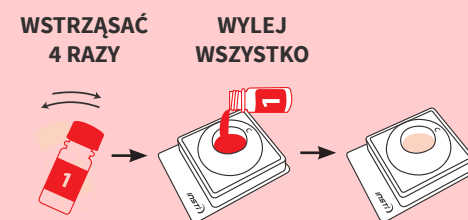


1. Wstrząśnij i wlej cały płyn. Poczekaj, aż ciecz zniknie.

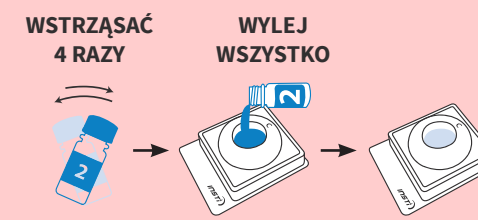

2. Wstrząśnij i wlej cały płyn. Poczekaj, aż ciecz zniknie.

**WSKAZÓWKA:** Może być konieczne delikatne stuknięcie pojemnika nr 2, aby wydobyć całą ilość płynu.

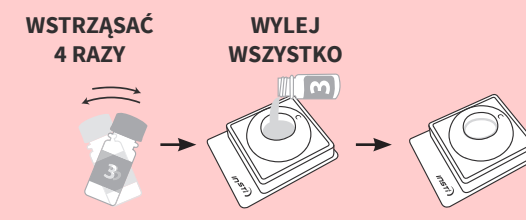

3. Wstrząśnij i wlej cały płyn. Poczekaj, aż ciecz zniknie.


### Krok 3: Odczytaj wynik

Odczytaj wynik natychmiast do **maksymalnie 1 GODZINY**.



#### Negatywny

Twój wynik testu jest negatywny.

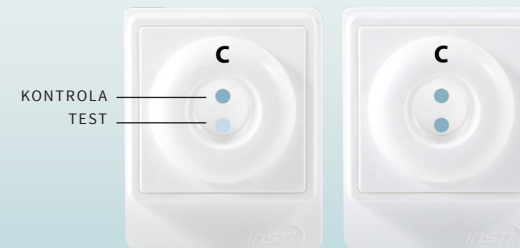

#### Pozytywny

Dwie kropki oznaczają, że wynik testu jest pozytywny. Prawdopodobnie jesteś nosicielem wirusa HIV. Pozytywne wyniki **MUSZĄ** zostać potwierdzone przez lekarza.



#### Wynik jest nieważny

Twój test nie zadziałał. Musi pojawić się kropla kontrolna wskazująca, że test został wykonany poprawnie.

**WSKAZÓWKA:** Jedna z kropeł może być ciemniejsza od drugiej. W rzadkich przypadkach słaby pierścień tła może pojawić się wokół kropli testowej. Nie należy tego interpretować jako wynik dodatni.

#### Wynik ujemny

Podobnie jak w przypadku wielu testów, istnieje szansa uzyskania fałszywych wyników. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia fałszywych wyników, postępuj zgodnie z instrukcjami i poprawnie przeprowadź test. Jeśli Twój wynik jest ujemny, ale w ciągu ostatnich 3 miesięcy byłeś zaangażowany w aktywność, która mogła narazić Cię na zakażenie wirusem HIV, możesz znajdować się w tak zwanym „okresie okienka serologicznego”. W takim wypadku zaleca się powtórzenie badania w późniejszym terminie.

#### Pozytywny wynik

Jak najszybciej skonsultuj się z lekarzem i poinformuj go, że wykonałeś samodzielny test na obecność wirusa HIV. Wszystkie pozytywne wyniki muszą zostać potwierdzone badaniem laboratoryjnym.

**Co dalej po uzyskaniu pozytywnego wyniku?**  
Posiadanie wirusa HIV nie oznacza, że masz AIDS. Przy wczesnej diagnozie i leczeniu jest mało prawdopodobne, że rozwinie się u Ciebie AIDS.

### Usuwanie

Usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. Umieść wszystkie przedmioty z powrotem do zewnętrznego opakowania. Wyrzuć do kosza na śmieci.

